



Odesílatel (razítko, podpis):

laboratorní vyšetření v klinické imunologii a alergologii

 Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17-Rosice
 Tel. 466 644 000

 e-mail: interimun@interimun.cz

Žádanka a informace k prováděným metodám:

<http://www.interimun.cz>

IČP:

Odbornost:

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Pojišťovna:

RČ:

Datum a čas odběru vzorku:

Bydliště:

Důvod provedení testu (vyplnění není povinné):

Další informace:

ANO NE

 kontakt s aktivní TBC; počátek kontaktu (datum):

 suspektní TBC (podle RTG nálezu)

 suspektní TBC (podle symptomů)

 TBC v osobní anamnéze

 terapie antituberkulotiky; pokud ano, kdy:

 imunodeficience

 terapie léky s imunosupresivním účinkem

 onemocnění vedoucí k imunosupresi

 BCG vakcinace

 test Mantoux II; hodnota (mm):

Vzhledem k dalšímu zpracování nelze vzorky odebírat v pátek a před svátky.

(výjimky pouze po domluvě s laboratoří)

Odběr se provádí do ČTYŘ speciálních, pro tento test určených, vakuových zkumavek, které vám dodáme:

1. zkumavka se ZELENÝM víčkem označená TB1

s mykobakteriálními antigeny pro stimulaci CD4+ T lymfocytů,

2. zkumavka se ŽLUTÝM víčkem označená TB2

s mykobakteriálními antigeny pro stimulaci CD8+ T lymfocytů,

3. zkumavka s FIALOVÝM víčkem (MIT)

s mitogenem,

4. zkumavka se ŠEDÝM víčkem (NIL)

bez stimulatorů; slouží jako kontrola.

Prázdné odběrové zkumavky skladujte v chladničce (nemrazte). Před odběrem vytemperujte na pokojovou teplotu.

Pokyny k odběru:

1. Od každého pacienta odeberte po 1 ml krve do ČTYŘ zkumavek odlišných barev uzávěrů (ZELENÁ, ŽLUTÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ).

Vakuum umožní odebrat optimální množství krve (viz černá ryska na zkumavce).

Odběr je nutné opakovat, pokud je množství odebrané krve výrazně mimo rysku.

Při takto malém objemu krev natéká relativně pomalu; požadovaný objem bude odebrán, pokud zkumavku necháte nasazenou na jehle ještě 2-3s po dosažení rysky.

2. Opakovaným obrácením zkumavky (10x) promíchejte obsah tak, aby byl celý vnitřní povrch zkumavky v kontaktu se vzorkem.

Vnitřní povrch odběrové zkumavky je pokryt antigeny a protisrážlivým činidlem, které je třeba rozpustit ve vzorku krve.

3. Zkumavky označte jménem pacienta a vyplňte žádanku o vyšetření.

Zkumavky s odebranou krví uchovejte při pokojové teplotě (22 ± 5 °C) (ne v lednici, ani krátkodobě).

Nízká teplota nevratně snižuje aktivitu lymfocytů, test pak nelze vyhodnotit.

Vzorek musí být zpracován v laboratoři nejpozději 16 hodin po odběru.

Datum a čas příjmu vzorku v laboratoři: