

Odesílatel (razítko, podpis):

 Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17-Rosice
 Tel. 466 644 000
 e-mail: interimun@interimun.cz
 Žádanka a informace k prováděným metodám:
 www.interimun.cz

IČP:

Odbornost:

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Pojišťovna:

Číslo pojištění / RČ:

Pohlaví: M Ž

Datum narození:

Kontakt na pacienta:

Datum a čas odběru vzorku:

Odběr provedl:

Osobní anamnéza (nepovinné):

Prodělané onemocnění SARS-CoV-2:

ANO NE

Očkování proti SARS-CoV-2:

ANO NE

Datum: _____

Datum: _____

Typ vakcíny: _____

Průkaz onemocnění: pozitivní PCR test: pozitivní antigení test:

1. dávka: _____

2. dávka: _____

3. dávka: _____

dávka: _____

Průběh onemocnění:

bezpříznakový lehký těžký hospitalizace

Onemocnění/léčba vedoucí k imunosupresi:

ANO NE

Další informace:

Pokyny k odběru:

Prosíme, neodebírejte v pátek a před svátky.

(výjimky pouze po domluvě s laboratoří)

Odběr se provádí do čtyř speciálních vakuových zkumavek, určených pouze pro tento test:

- zkumavka s **ČERVENÝM** víčkem označená **Ag1**; se sadou peptidů pro specifickou stimulaci CD4+ pomocných T lymfocytů,
- zkumavka s **ORANŽOVÝM** víčkem označená **Ag2**; se sadou peptidů pro specifickou stimulaci CD4+ pomocných a CD8+ cytotoxických T lymfocytů,
- zkumavka s **FIALOVÝM** víčkem (**MIT**); s mitogenem; pozitivní kontrola,
- zkumavka se **ŠEDÝM** víčkem (**NIL**); bez stimulatorů; negativní kontrola.

Odběrové zkumavky si vyžádejte u nás v laboratoři.

Skladujte v chladničce (nemrazte). Před odběrem vytemperujte na pokojovou teplotu.

1. Od každého pacienta odeberte 4 x 1 ml krve do zkumavek odlišných barev uzávěrů (**ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ**).

Vakuum umožní odebrat optimální množství krve (viz černá ryska na zkumavce). Odběr je nutné opakovat, pokud je množství odebrané krve výrazně mimo rysku. Při takto malém objemu krev natéká relativně pomalu; požadovaný objem bude odebrán, pokud zkumavku necháte nasazenou na jehle ještě 2-3 s po dosažení rysky.

2. Zkumavky 10x obraťte, aby došlo k promíchání obsahu a celý vnitřní povrch zkumavky se dostal do kontaktu se vzorkem.

Vnitřní povrch odběrové zkumavky je pokryt antigeny a protisrážlivým činidlem, které je třeba rozpustit ve vzorku krve.

3. Zkumavky označte jménem pacienta a vyplňte žádanku o vyšetření.

Zkumavky s odebranou krví uchovejte při pokojové teplotě - ne v lednici.

Nízká teplota nevratně snižuje aktivitu lymfocytů, test pak nelze vyhodnotit. Vhodná je teplota 22 ± 5 °C.

Vzorek musí být zpracován v laboratoři nejpozději 16 hodin po odběru.